


【医療関係者の皆様へ】フェイスシールドの作成手順ご紹介

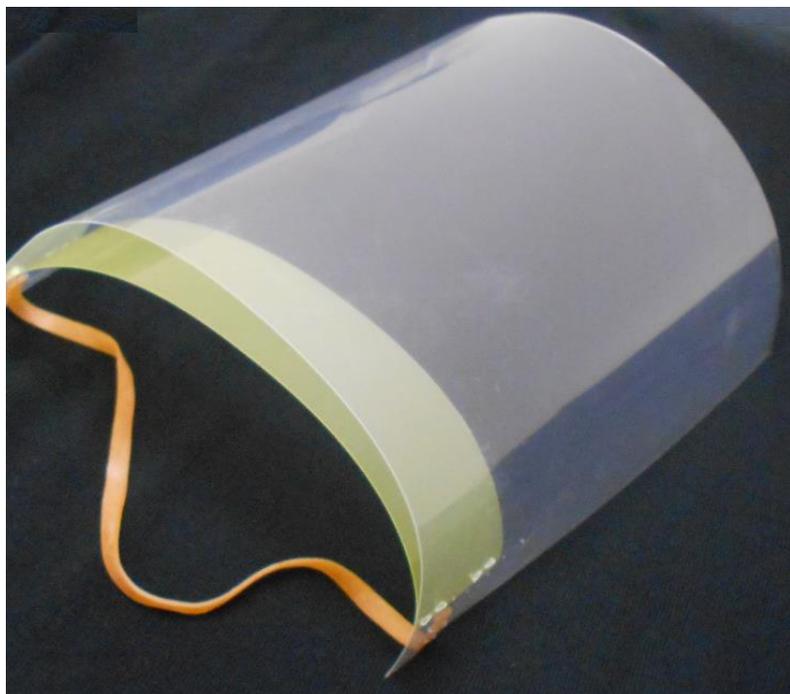

(完成品)

用意するもの（1個分）

【顔を覆う用】

・透明クリアファイル（A4サイズ）・・・・・・・・・・・・・・ 1枚

【帯用】

・クリアファイル（A4サイズ）（色付き・柄付き可）

約4cm×22cmにカットしたもの・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 1枚

・ゴムバンド（太い輪ゴム 6mm幅×長さ28cm）・・・・・・・・・・・・ 1本

【道具】

・ホッチキス

・ハサミ

フェイスシールドの作成手順


一般財団法人 住友病院
キャリア開発室版 2020.4.22




1. クリアファイル（1枚にカットしたもの）に帯の部分は上はクリアファイルにそろえ、
左右は端から2 cmの位置にホッチキスで2か所止める
※ホッチキスは《すべて》平たい方が内側になるよう止める



⇒

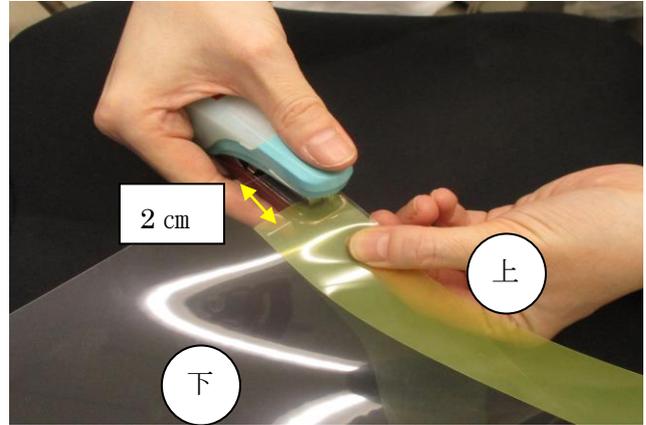

2. クリアファイルの左右1.5 cmに合わせ、輪ゴムをホッチキスで止める
(強度が落ちないようにホッチキスは輪ゴムからはみ出さないよう注意！)

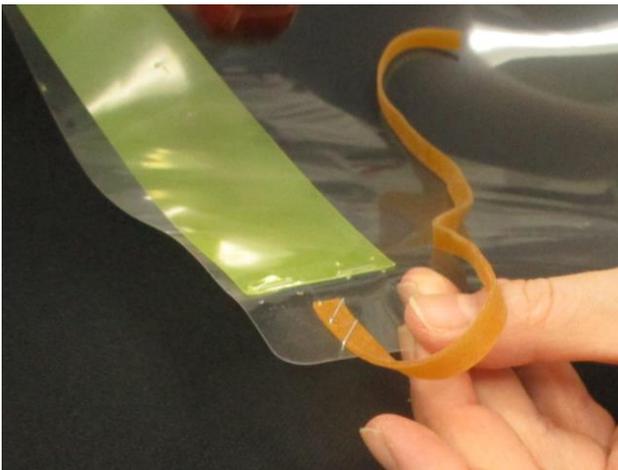

3. つけるときに呼気の水蒸気が上に抜けるよう1 cmの隙間ができていれば完成です

